

Mitteilung der Zentralen Einrichtung Klinische Chemie (# 138)

01. Juli 2021

Wichtige Hinweise zur Probenabnahme

Sehr geehrte Einsender,

um eine schnellstmögliche Bearbeitung der Proben zu gewährleisten achten Sie bitte auf:

Verwendung der Standard-Monovetten

Im Rahmen der laufenden Umstellung der Laborautomation fällt aktuell vor allem die Einsendung alter Citrat- und EDTA-Röhrchen auf.

In der neuen Laborautomation können die alten, schmälere Citrat- und EDTA-Röhrchen nicht mehr automatisiert bearbeitet werden!

Standard-Sarstedt-Monovetten (seit 01.12.2020)

Artikelbezeichnung	Volumen	Geometrie	SAP-Nr.	Art-Nr.
Citrat	4,3 ml	75 mm x 13 mm	60831813	04.1922
EDTA K	2,6 ml	65 mm x 13 mm	60861814	04.1901

Bitte verwenden Sie im Regelfall bei Erwachsenen nur diese Formate!

Korrekte Etikettierung

Das Etikett muss mittig (nicht zu dicht am Boden, nicht zu dicht am Deckel), senkrecht, faltenfrei und sauber geklebt werden; wichtig sind vollständig ausgedruckte, unbeschädigte Etiketten, da der Barcode sonst von den Geräten nicht korrekt gelesen werden kann.



Korrekte Befüllung der Röhrchen

Befüllen Sie die Röhrchen vollständig bis zur jeweiligen Füllungs-Markierung!

Befüllung und Einsendung aller für eine Anforderung benötigten Röhrchen:

Für Analyte der Spezialgerinnung wird ein größeres Probenvolumen benötigt, für jedes Etikett daher bitte ein korrekt befülltes Citrat-Röhrchen einsenden. Bitte die Anzahl der Etiketten beachten!

gez. Prof. Dr. H. J. Groß