

Aushang Transport und Lagerung von Material MB-QTB

Transport und Lagerung von Materialien für die mikrobiologische Diagnostik

Material an die Mikrobiologie bitte zeitnah schicken, **nicht sammeln!**

Ist ein Versand nicht unmittelbar möglich (z.B. außerhalb Transportzeiten/Ausfall Rohrpost) bitte **Proben bei Raumtemperatur lagern.**

Ausnahmen sind:



Quantiferon-Röhrchen:

Abnahme nur werktags!

Lagerung bei Raumtemperatur maximal 12 Stunden, ansonsten bitte neu abnehmen.



Stuhl

Nativurin (Becher)

Bis zum Versand im **Kühlschrank** lagern.

Verpackung bei Versand mit Rohrpost (Nr 1050)



Blutkulturflaschen immer zusätzlich in Spezialbehälter verpacken!



Beachten Sie bitte auch unsere Hinweise auf der Institutshomepage

Unser Standort: OE; O22 Raum 3416

Bearbeiter*in	Freigeber*in	ID	Revision	Seite
Maier, Sonja	Furitsch, Martina	32916	000/26.08.2020	1 von 1