

Aushang Transport und Lagerung von Material MB-QTB

Transport und Lagerung von Materialien für die mikrobiologische Diagnostik

Material an die Mikrobiologie bitte zeitnah schicken, **nicht sammeln!**

Ist ein Versand nicht unmittelbar möglich (z.B. außerhalb Transportzeiten/Ausfall Rohrpost)

bitte **Proben bei Raumtemperatur lagern.**

Ausnahmen sind:



Quantiferon-Röhrchen:

Abnahme nur werktags!

Lagerung bei Raumtemperatur

maximal 12 Stunden,

ansonsten bitte neu abnehmen.



Stuhl



Nativurin (Becher) →
für Erreger/Resistenz:
Borsäure-Röhrchen
verwenden

Bis zum Versand im
Kühlschrank lagern.

Verpackung bei Versand mit Rohrpost (Nr 1050)



Beachten Sie bitte auch unsere Hinweise auf der Institutshomepage

Unser Standort: OE; O22 Raum 3416

Bearbeiter*in	Freigeber*in	ID	Revision	Seite
Maier, Sonja	Maier, Sonja	32916	002/06.02.2023	1 von 1