



UNIVERSITÄTS  
KLINIKUM  
ulm

Universitätsklinikum Ulm

**Institut für Med. Mikrobiologie und Hygiene**

Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. med. S. Stenger

Telefon:  
Varia 65321,  
Serologie 65327

## Transport und Lagerung von Materialien für die mikrobiologische Diagnostik

Material an die Mikrobiologie bitte zeitnah schicken, **nicht sammeln!**

Ist ein Versand nicht unmittelbar möglich (z.B. außerhalb Transportzeiten/Ausfall Rohrpost)  
bitte **Proben bei Raumtemperatur lagern.**

### **Ausnahmen sind:**



#### Quantiferon-Röhrchen:

Abnahme nur werktags!

Lagerung bei Raumtemperatur maximal 12 Stunden,  
ansonsten bitte neu abnehmen.



Stuhl Nativurin (Becher)  
Bis zum Versand im  
**Kühlschrank** lagern.

### Verpackung bei Versand mit Rohrpost (Nr 1050)



Blutkulturflaschen immer zusätzlich in Spezialbehälter verpacken!



Beachten Sie bitte auch unsere Hinweise auf der Institutshomepage

**Unser Standort: OE; O22 Raum 3416**