

Transporttemperaturen:

Die Deutsche Gesellschaft für Liquordiagnostik und klinische Neurochemie e.V.(DGLN) und die Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) empfehlen:

- Zytologie und Basisdiagnostik: Sollte ungekühlt (Raumtemperatur) und unverzüglich erfolgen.
- Mikrobiologie & Bakteriologie: Transport idealerweise ebenfalls bei Raumtemperatur.
- Längere Transportzeiten/VIEREN/Proteine: Bei Transport von mehr als 2 Stunden wird eine Kühlung der Probe von 2°-8° C empfohlen.
- Demenzmarker/Spezielle Marker sind bei 2°-8°C deutlich stabiler oder auf Trockeneis.

Genauere Vorgaben für den korrekten Versand von Liquorproben stellt die DGLN in ihrem offiziellen Methodenkatalog bereit.

Bearbeiter*in	Freigeber*in	ID	Revision	Seite
Renske, Nicole	Renske, Nicole	226007	002/13.05.2026	1 von 1